

## 回収ネット

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 構造・構成ユニット

##### 1.構成


本製品は操作部、挿入部から構成されており、以下の 6 機種がある。

- ・ 00711180                      ・ 00711183
- ・ 00711181                      ・ 00711184
- ・ 00711182                      ・ 00711185


##### 2.各部の名称

★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。


モデル名 00711180、00711181、00711182、00711183

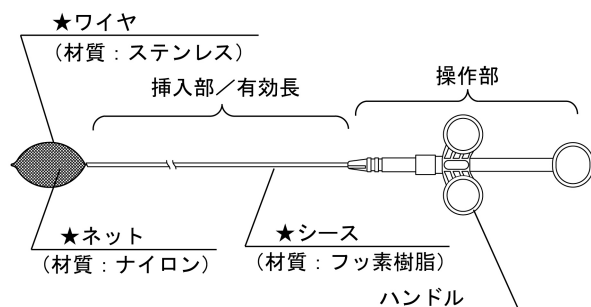

モデル名 00711184

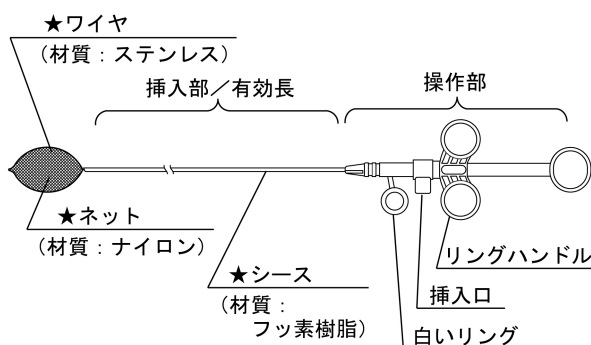

モデル名 00711185

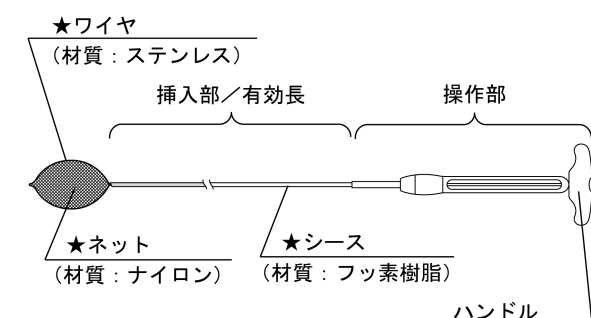

##### \*3.仕様

| モデル名                  | 00711180          | 00711181                                                          | 00711182 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| ネットの形状                |                   |                                                                   |          |
| シース外径 (mm)            | Φ2.6              | Φ3.05                                                             | Φ2.6     |
| シース有効長 (mm)           | 2300              |                                                                   |          |
| ネット幅 (mm)             | 18~30             |                                                                   |          |
| 組み合わせ<br>可能な当社<br>内視鏡 | 有効長<br>チャン<br>ネル径 | 1850mm 以下<br>Φ2.8mm    Φ3.2mm    Φ2.8mm<br>以上        以上        以上 |          |

| モデル名                  | 00711183          | 00711184                                                        | 00711185 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| ネットの形状                |                   |                                                                 |          |
| シース外径 (mm)            | Φ2.6              | Φ1.83                                                           | Φ3.05    |
| シース有効長 (mm)           | 1600              |                                                                 | 2300     |
| ネット幅 (mm)             | 18~30             | 15~28                                                           | 35~54    |
| 組み合わせ<br>可能な当社<br>内視鏡 | 有効長<br>チャン<br>ネル径 | 1200mm 以下<br>Φ2.8mm    Φ2mm    Φ3.2mm<br>以上        以上        以上 |          |

##### 作動・動作原理

操作部のハンドル操作により先端のネットを開閉させ、ポリープや異物などを回収する。

##### 【使用目的又は効果】

##### 使用目的

00711180、00711181 はポリープ回収、00711182、00711183、00711185 は異物回収、00711184 は小児用異物回収を目的としている。

##### 【使用方法等】

##### 1.点検

使用の前に、必要な滅菌をする。

##### (1)滅菌パックの点検

滅菌パックに破れ、シール部のはがれ、水などによるぬれなどの異常がないことを確認する。

##### (2)外観の点検

本製品に曲がり、折れ、接続部のはずれおよび緩み、その他の損傷がないことを確認する。

##### (3)作動の点検

1)ハンドルまたはリングハンドルを前後に動かし、ネットが開閉できることを確認する。

2)00711184 については、白いリングをリングハンドル中央にある挿入口に掛けてリングハンドルを前後に動かし、ネットが開閉できることを確認する。

##### 2.内視鏡 (鉗子台のない機種) への挿入

(1)ハンドルまたはリングハンドルを引き、ネットをシース内に収納する。

(2)本製品を内視鏡の鉗子栓に挿入する。

(3)内視鏡の視野に本製品のシース先端を確認するまでシースを進ませる。

- 3.内視鏡（鉗子台のある機種）への挿入  
(1)ハンドルまたはリングハンドルを引き、ネットをシース内に収める。  
(2)内視鏡の鉗子台を最大 UP にする。  
(3)本製品を内視鏡の鉗子栓に挿入する。  
(4)シース先端部が内視鏡の鉗子台に突き当たったことを確認し、鉗子台を DOWN にする。  
(5)本製品の挿入部をさらに 20mm 程度挿入し、鉗子台を UP にする。  
(6)内視鏡の視野内に本製品のシース先端部を確認するまでシースを前進させる。
- 4.ポリープ、異物の把持  
(1)回収物をわずかに過ぎるところまで、シース先端部を前進させる。  
(2)ハンドルまたはリングハンドルを止まるまで前方に押し、ネットを開く。  
(3)目的の回収物をネット内に捕そくする。  
(4)ハンドルまたはリングハンドルを引き目的の回収物を把持する。
- 5.ポリープ、異物の回収  
(1)ネットが内視鏡の視野内に入るまでシースを手元側へ引き込む。  
(2)把持したポリープ、異物を、内視鏡と共に体外へ引き抜く。  
(3)ハンドルまたはリングハンドルを押しネットを開く。  
(4)把持したポリープ、異物をネットからはずし、回収する。
- 6.内視鏡からの引き抜き  
ハンドルまたはリングハンドルを引きネットを閉じ、内視鏡から本製品を引き抜く。
- 7.廃棄  
本製品の使用が終了したら、病院の廃棄物処理プロトコルに従って適切な方法で廃棄する。

#### **\*\*使用方法等に関連する使用上の注意**

- 1.次のような状態では、本製品が正しく機能しないことがある。  
(1)過度の速度、過度の力でハンドルを「開」の位置に動かす。  
(2)極度に屈曲した状態の内視鏡に本製品を挿入する。またはその状態でネットを開く。  
(3)極度に巻かれた状態で本製品を作動させる。  
(4)シース根元を極度に曲げた状態で、本製品を作動させる。
- 2.ネットを閉じる際にネットに過度な圧力をかけないこと。
- 3.本製品のネットを引き抜いたあと、回収物が開いたネットから取れなかった場合、容器に入れた水ですすいで取り除くこと。

**\*\*組み合わせで使用する医療機器については、【形状・構造及び原理等】の「3.仕様」を参照すること。**

#### **\*\*\*【使用上の注意】**

##### **重要な基本的注意**

###### **一般的事項**

- (1)本製品は出荷時に滅菌していない。初回の使用前に【保守・点検に係る事項】の指示に従って洗浄、滅菌すること。
- (2)鉗子台のある内視鏡に使用する場合は、必ず鉗子台を最大 UP にした状態で、本製品を挿入すること。
- (3)シースのよじれを防ぐために内視鏡への挿入は小刻みに行うこと。
- (4)抵抗が大きくて挿入が困難な場合は、無理なく挿入できるところまで、内視鏡のアングルを戻すこと。
- (5)急激な突き出しはしないこと。
- (6)ポリープ、異物の回収は、内視鏡の視野内で異物を確認した状態で行うこと。
- (7)異物などで管腔が詰まっている場合は、本製品をむやみに異物の先に通さないこと。
- (8)ガラスの破片、開いた安全ピンなどの鋭利な物体を内視鏡下で回収する際のオーバーチューブの使用法については、除去作業中に起こる可能性がある合併症に注意し、医学文献を参照すること。
- (9)回収するポリープ、異物を把持する際は、誤って他の組織や器官を把持しないように注意すること。
- (10)回収作業の間は、回収物がばらばらになったり、はずれたり、気管に吸い込まれたりしないように、本製品をていねいに引き続けること。

##### **不具合**

###### **その他の不具合**

機器の破損、機能の低下

##### **有害事象**

###### **その他の有害事象**

感染、組織の炎症、穿孔、大出血、粘膜損傷

#### **【保管方法及び有効期間等】**

##### **有効期間**

外箱およびパックに表示された使用期限を確認すること。  
（自己認証（製造元データ）による）

#### **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：

**オリンパスメディカルシステムズ株式会社**  
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先  
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

外国製造元：

**ユーエス エンドスコーピー グループ**  
**US ENDOSCOPY GROUP**  
アメリカ合衆国



## オリンパス製品をご使用いただくうえで、ご注意いただきたい事項

弊社の医療機器製品をご使用いただく際に、製品の種類によらずご注意いただきたい事項を下記のとおりまとめております。

弊社医療機器製品（以下、本製品と略します）を安全かつ効果的にご使用いただくため、下記の注意事項に従ってお取り扱いいただきますよう、よろしくお願いいたします。

- =====
1. 本製品は、医師または医師の監督下の医療従事者が使用するものです。
  2. 臨床手技については、使用者が十分な研修を受け、本製品の使用の可否を含む最適な術式を専門的な立場で判断したうえで、本製品を適切に使用することを前提としています。本条件に該当しない場合は、使用しないでください。
  3. 【使用目的又は効果】に示した目的以外には使用しないでください。
  4. 本製品の『添付文書』および『取扱説明書』<sup>注）</sup>には、本製品を安全かつ効果的に使用するうえで必要不可欠な情報が盛り込まれています。使用に先立って、本製品の『添付文書』や『取扱説明書』および同時に使用する機器や薬剤の『添付文書』や『取扱説明書』を熟読し、その内容を十分に理解し、その指示に従って使用してください。
  5. 本製品の『添付文書』や『取扱説明書』および同時に使用する機器の『添付文書』や『取扱説明書』は、すぐに読める場所に保管してください。
  6. 本製品と他の機器を併用する場合には、正規の組み合わせで使用してください。また、洗浄／消毒／滅菌用の薬剤は、当社指定のものを使用してください。
  7. 術中に本製品が故障するなどの予期せぬ事態による手技の中断を避けるため、予備の機器を用意する、もしくはその他の手段への移行態勢および入院計画を整えたうえで使用してください。
  8. 使用期限が設定されている製品は、期限を超えた使用をしないでください。
  9. 滅菌パックに入った製品は、滅菌パックの開封時に、滅菌パックの破れ、シール部のはがれなどの異常がないことを本製品の『取扱説明書』に従って点検し、異常が疑われた場合は使用しないでください。
  10. 本製品を使用する前に本製品を『取扱説明書』に従って点検し、異常が疑われた場合は使用しないでください。
  11. 本製品を使用中に異常が疑われた場合は使用を中止してください。また、対処方法が不明な場合はオリンパスに問い合わせてください。
  12. 電源プラグがある製品は、延長コードや変換プラグを使用しないで接地のできる医用コンセントに直接接続してください。また、接続した医用コンセントの電源容量が十分であることを確認のうえ使用してください。
  13. 本製品および本製品に接続するコード類に過度な曲げや引っ張りや圧迫を加えないでください。
  14. 感染予防のため、本製品の点検時、使用時および手入れ時には適切な保護具を着用してください。
  15. 再使用を行う製品は、使用后速やかに本製品の『取扱説明書』に従って、洗浄／消毒／滅菌を行ってください。また、保管や病院外へ持ち出すときも洗浄／消毒／滅菌を行ってください。
  16. 定期点検が必要な製品は、本製品の『取扱説明書』に従って定期点検を実施してください。
  17. 本製品は、当社が認めた者以外、修理できません。
  18. 本製品を分解や改造しないでください。
  19. 本製品を廃棄する際は、医療廃棄物として、国または地域の法律およびガイドラインに従って廃棄してください。

注）製品の種類によっては『取扱説明書』が付属されない場合があります。『取扱説明書』が付属されていない製品については、『添付文書』を確認してください。